

CHEMTRUE

Prueba para la detección de drogas en orina

(Vaso)

Reg. Sanitario
0535R2017SSA

Chemtrue



LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- La prueba está diseñada para uso con orina humana solamente.
- Un resultado reactivo con cualquiera de las pruebas indica solamente la presencia de un metabolito/droga. No indican ni miden la intoxicación.
- Existe la posibilidad de que sustancias puedan interferir con el examen y causar resultados falsos. Ver lista de sustancias que producen reacciones cruzadas o que interfirieran con el funcionamiento de la prueba.
- Si un metabolito/droga se encuentra presente en la muestra de orina, el análisis no indica la frecuencia de consumo o distingue entre drogas de abuso y ciertos alimentos y medicamentos.
- Mantenga el dispositivo de prueba en el empaque sellado hasta su uso.
- Deseche la prueba si el empaque está rasgado o roto.
No reutilice la prueba y no utilice pruebas caducadas.



DESCRIPCIÓN

Vaso integrado para **detección de drogas** y sus **metabolitos en orina humana**. Esta prueba ofrece una detección rápida y confiable del abuso de drogas. Puede detectar las siguientes drogas:

PRUEBA	CORTE
Anfetamina (AMP)	1000 ng/mL
Metanfetamina (MET)	1000 ng/mL
Barbitúricos (BAR)	300 ng/mL
Benzodiazepinas (BZO)	300 ng/mL
Cocaína (COC)	300 ng/mL
Marihuana (THC)	50 ng/mL

*Presentación de 3 y 5 parámetros

Este ensayo proporciona sólo un resultado preliminar. Un método químico alternativo más específico debe ser utilizado para obtener un resultado confirmatorio. Cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) o Cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC/MS) son las técnicas recomendadas de métodos confirmatorios. Examen clínico y juicio profesional deben aplicarse a cualquier resultado de la prueba, particularmente cuando se indican resultados reactivos.



ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

La prueba se debe almacenarse a una humedad normal y temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). El producto es sensible a la humedad y debe utilizarse inmediatamente después de ser abierto.

CERTIFICACIONES

Comision Federal para la
Protección contra Registros
Sanitarios - COFEPRIS

U.S. Food and Drug
Administration - FDA



PROCEDIMIENTO

IMPORTANTE: No utilice la prueba si ya ha caducado.

1. Saque la prueba del empaque y utilícela lo más pronto posible.
2. Recolecte la orina en el vaso. (La orina debe llegar al nivel mínimo señalado)
3. Cierre el vaso y coloque en una superficie plana.
4. Retire la etiqueta desprendible.
5. Espere el tiempo indicado para realizar la lectura.

El resultado debe leerse en un lapso de **5 minutos**.
No interprete el resultado después de **8 minutos**.



Los resultados reactivos preliminares de la prueba se deben confirmar con algún otro método.



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

NEGATIVO: Una línea de color aparece en la región de control (C) y una línea de color aparece en la región de prueba (T). Este resultado negativo indica que la concentración de droga en la muestra de orina está por debajo de los niveles de corte designado. La intensidad del color de la línea de la región de prueba (T) puede ser más débil o más fuerte que la de la línea de control (C).

POSITIVO: Una línea de color aparece en la región de control (C). La ausencia de una línea coloreada en la región de prueba (T) indica un resultado positivo.

INVÁLIDO: No aparece ninguna línea en el área "C". No se debe determinar una muestra reactiva preliminar sino hasta que se forme la línea "C". Si no se forma la línea "C", el resultado de la prueba no es válido y se deberá repetir con otra prueba.



NEGATIVO



POSITIVO



INVALIDO



CORPORINTER
S.A. DE C.V.

corporinter.com

ESTABLECIMIENTO
Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A,
Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México.

AVISO PUBLICIDAD COFEPRIS
223300202C4229

Versión MKT-DP-1603-DIDESACV-001 21-09-2022

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento por ningún medio.