

# Tiras de Prueba GlucoNavii® GDH

STANDARD  
**GlucoNavii®** GDH  
BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Reg. Sanitario  
2247R2015SSA



## PRESENTACIÓN

- Caja con 2 botes de 25 tiras de medición cada uno y 1 instructivo.
- Caja con 2 botes de 50 tiras de medición cada uno y 1 instructivo.

## ALMACENAMIENTO

- Almacene las tiras reactivas a temperatura ambiente entre 2-32 °C.
- No refrigerar o congelar.
- El contenedor de la tira reactiva tiene la capacidad de mantener una humedad regular, por lo que no debe cambiar el contenedor.

## DESCRIPCIÓN

El kit de tiras de prueba para Glucosa en sangre **STANDARD GlucoNavii® GDH** está diseñado para la autoevaluación de glucosa utilizando 0.5 µL de sangre capilar, basado en metodología de amperometría, con un rango de medición de 10 - 600 mg / dL.

La composición de la tira de prueba consta de:

- Glucosa deshidrogenasa
- Ferricianuro de potasio.

## LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las tiras de prueba de glucosa GlucoNavii son solo para uso de diagnóstico in vitro.

- No use las tiras de prueba después de su fecha de vencimiento.
- No reutilice las tiras de prueba.
- La tira de prueba de glucosa en sangre STANDARD GlucoNavii® GDH se debe usar solo con el medidor de glucosa en sangre STANDARD GlucoNavii® GDH.
- Utilizar la tira de prueba tan pronto la haya retirado del frasco.
- Las tiras de prueba son sensibles a la humedad; manténelas en un lugar seco y fresco,
- Evita el contacto directo con los rayos solares.