


Reg. Sanitario  
2875R2013SSA



## PROCEDIMIENTO

Antes de aplicar la prueba, el material y las muestras deben estar a temperatura ambiente.

- Saque el cassette de la bolsa de papel aluminio y colóquela sobre una superficie seca y limpia.
- Identifique el cassette para cada muestra o control.
- Agregue 30µl (**1 gota**) de muestra o de control en el pocillo redondo para la muestra que se encuentra en el cassette. Espere **15 segundos** a que la muestra se absorba.
- Después agregue 50µl (**1 gota**) de diluyente dentro del mismo pocillo redondo.
- El resultado de la prueba se **lee de 5 a 10 minutos**. **No interprete el resultado antes o después del tiempo establecido.**

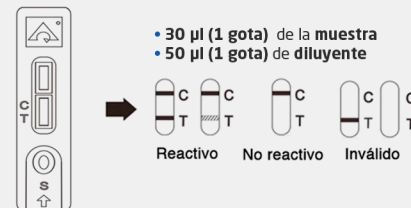

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La prueba rápida de **INTEC® ADVANCED QUALITY® ANTI-HIV (1&2)** es un ensayo inmunocromatográfico con oro coloidal para la detección cualitativa de anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV) en sangre entera, suero o plasma.

Es una prueba de **uso exclusivo en laboratorios clínicos y de gabinete**, los resultados reactivos deben ser confirmados mediante un método de referencia.

## ALMACENAMIENTO

- La prueba se debe almacenar de 2-30 °C.
- **Sangre Entera:**  
Las muestras de sangre entera deben ser usadas inmediatamente después de su recolección.
- **Suero o Plasma:**  
Las muestras deberán ser refrigeradas si no son usadas el mismo día de su recolección y a partir del tercer día de no ser usadas deberán congelarse.

Evite congelar y descongelar las muestras más de 2 o 3 veces antes de usarlas.

## MATERIAL INCLUIDO

- **40 cassettes** en bolsas individuales de papel aluminio con un gotero de plástico y un desecante.
- **4 diluyentes** de muestra
- **Instructivo de uso**

## LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Los cassettes se pueden almacenar a temperatura ambiente y en condiciones secas. Si se refrigeran, los cassettes deben dejarse a temperatura ambiente antes usarlos.
- Todos los resultados positivos se deben confirmar mediante un método alternativo.
- No utilice el material después de la fecha de caducidad.

### Evaluación InDRE

Sensibilidad **100%**  
Especificidad **99.71%**

Dirección General de  
Epidemiología - **DGE**



**CORPORINTER  
S.A. DE C.V.**

[corporinter.com](http://corporinter.com)

**ESTABLECIMIENTO**  
Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A,  
Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México.

AVISO PUBLICIDAD COFEPRIS  
INTERNET 193300202C6913

Versión **MKT-DP-1603-DIDESACV-001 21-09-2022**

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento por ningún medio.