


# JusChek<sup>®</sup> hCG TIRAS

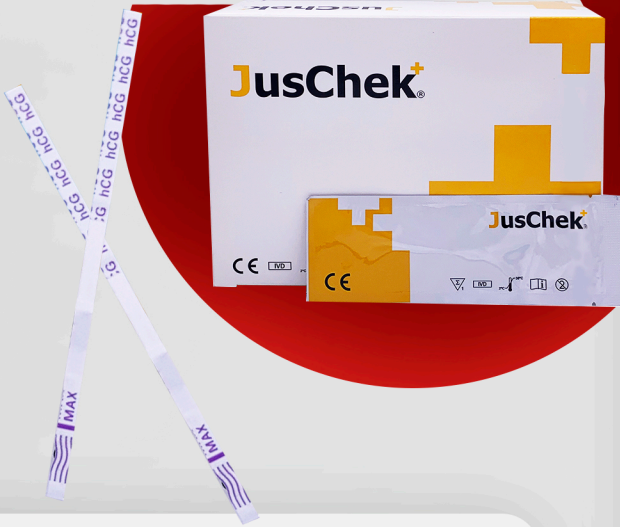

Reg. Sanitario  
0027R2022SSA



## PROCEDIMIENTO

### ORINA

- Recolecte la muestra de orina en un recipiente limpio y seco. Se recomienda la primera orina de la mañana, ya que generalmente contiene la mayor concentración de hCG.
- Deje que la bolsa metálica llegue a temperatura ambiente (15-30°C) antes de abrirla.
- Con las flechas señalando hacia la muestra de orina, sumérgjala verticalmente durante 15 segundos. No deje pasar la línea máxima (MAX) en la tira de prueba al sumergir.
- Coloque la tira de prueba en una superficie plana no absorbente.
- Inicie el temporizador y espere a que aparezcan las líneas de color.

### SUERO O PLASMA

- Deberá extraer asépticamente la muestra de sangre en un tubo sin anticoagulantes (suero) o con anticoagulantes (plasma).
- Deberá separar el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemólisis.
- Deje que la bolsa metálica llegue a temperatura ambiente (15-30°C) antes de abrirla.
- Con las flechas señalando hacia la muestra de suero o plasma, sumérgjala verticalmente durante 15 segundos. No deje pasar la línea máxima (MAX) en la tira de prueba al sumergir.
- Coloque la tira de prueba en una superficie plana no absorbente.
- Inicie el temporizador y espere a que aparezcan las líneas de color.

## DESCRIPCIÓN

**Prueba Rápida de Embarazo** es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de la hormona gonadotropina coriónica humana en orina, suero o plasma, para ayudar en la **detección temprana del embarazo**.

Cuenta con una **Sensibilidad del 99.9%, Especificidad del 99.9% y Precisión del 99.9%**

## ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

La prueba se debe almacenar a una humedad normal y temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). El producto es sensible a la humedad y debe utilizarse inmediatamente después de ser abierto.

## LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Solamente para uso profesional de diagnóstico *in vitro*.
- No abra la bolsa de la prueba hasta que esté listo para iniciar la prueba.
- Esta prueba proporciona un diagnóstico de presunción del embarazo.
- El diagnóstico de embarazo que se va confirmar sólo debe ser hecho por un médico después de haber evaluado todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.

## INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

Lea el resultado a los **3 minutos cuando se analice una muestra de orina, o en 5 minutos cuando se analice una muestra de suero o plasma**.

**POSITIVO:** Dos líneas de color aparecen. Una línea quedará en la región de control (C) y otra línea debe estar en la zona de la prueba (T). Una línea puede ser más clara que la otra; no tienen que coincidir. Esto significa que usted está probablemente embarazada.

**NEGATIVO:** Una línea de color aparece en la región de control (C). No aparece ninguna línea en la zona de la prueba (T). Esto significa que usted probablemente no está embarazada.

**INVÁLIDO:** El resultado no es válido si no aparece una línea de color en la región de control (C), incluso si aparece una línea en la región de la prueba (T). Debe repetir la prueba con una nueva tira de prueba.



**CORPORINTER  
S.A. DE C.V.**

[corporinter.com](http://corporinter.com)

**ESTABLECIMIENTO**  
Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A,  
Colonia Paraísos del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México.

**AVISO PUBLICIDAD COFEPRIS**  
223300202C4227

Versión MKT-DP-1603-DIDESACV-001 21-09-2022

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento por ningún medio.