

# Tiras Reactivas LipidoCare Glucosa

Reg. Sanitario  
22493R2014SSA



 SD BIOSENSOR

## PRESENTACIÓN

- Caja con 50 tiras reactivas para glucosa.
- Inserto.

## ALMACENAMIENTO

- Almacene las tiras reactivas a temperatura ambiente entre 2-32 °C.
- No refrigerar o congelar.
- 18 meses stock - 6 meses después de abierto.
- El contenedor de la tira reactiva tiene la capacidad de mantener una humedad regular, por lo que no debe cambiar el contenedor.

## DESCRIPCIÓN

Las tiras reactivas para Glucosa en sangre **Standard LipidoCare®** está diseñada con un electrodo que mide los niveles de glucosa para su autoevaluación utilizando 0.9 µL de sangre capilar, basado en metodología de electroquímica, con un rango de medición de 10 - 600 mg / dL.

La composición de la tira reactiva consta de:

- Glucosa oxidasa.
- Ferricianuro de potasio.

## LIMITACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las tiras reactivas de glucosa Standard LipidoCare® son solo para uso de diagnóstico in vitro.

- No use las tiras reactivas después de su fecha de vencimiento.
- No reutilice las tiras reactivas.
- La tira reactiva de glucosa en sangre STANDARD LipidoCare® se debe usar solo con el medidor de glucosa en sangre STANDARD LipidoCare®.
- Utilizar la tira reactiva tan pronto la haya retirado del frasco.
- Las tiras reactivas son sensibles a la humedad; manténelas en un lugar seco y fresco,
- Evita el contacto directo con los rayos solares.